



Bedienungsanleitung für Ultraschall-Scaler-Spitze

1. Produktbeschreibung

1.1 Aus Arbeitsspitze und Schaft gebildet. Verbunden mit Ultraschall-Scaler-Handstück, austauschbar. Angetrieben durch Ultraschall-Scaler.

1.2 Arbeiten Sie mit dem Ultraschall-Scaler, um die Zahnreinigung, Perio- und Endo-Behandlung durchzuführen.

2. Kontraindikationen

2.1 Keine Anwendung bei Hämophilie-Patienten, Patienten oder Behandler mit Herzschrittmacher.

2.2 Vorsicht bei Herzerkrankungen, Schwangere und Kinder.

3. Gebrauchsanweisung

3.1 Scaling-Spitzen (supragingival) sind mit dem Modus G zu betreiben, Perio-Spitzen (subgingival) ist mit dem Modus P und Endo-Spitzen mit dem Modus E.

3.2 Geeignete Spitze entsprechend den Betriebsanforderungen auswählen und mit Drehmomentschlüssel fest am Handstück anbringen (mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel).

3.3 Schalten Sie den Ultraschall-Scaler für den Betrieb ein. Lassen Sie die Ultraschallspitze während des Betriebs nicht in vertikaler Richtung die Zahnoberfläche berühren, drücken Sie nicht zu fest. Zähne oder die Spitzen können beschädigt werden.

3.4 Spülen Sie nach dem Betrieb die Spitze und Handstück, indem Sie das Gerät 30 Sekunden lang mit Wasser durchspülen lassen und entfernen Sie danach die Spitze vom Handstück zur Reinigung und Sterilisation.

4. Vorsichtsmaßnahmen

4.1 Stellen Sie sicher, dass die Spitze fest am Handstück angebracht ist und stellen sie ebenfalls sicher, dass ausreichend Kühlflüssigkeit verwendet wird.

4.2 Ultraschallspitzen müssen vor jedem Gebrauch gereinigt und sterilisiert werden.

Desinfektions- und Sterilisationsmethoden: Reinigung und Desinfektion im Thermodesinfektor und anschließend bei 134 °C sterilisieren (Dampfsterilisator / Autoklav).

Desinfektionsmittel mit chlorhaltigen Inhaltsstoffen dürfen niemals verwendet werden, da diese dauerhafte Schäden verursachen.

4.3 Deinstallieren Sie die Spitze nicht, während das Ultraschallgerät noch in Betrieb ist.

4.4 Ersetzen Sie die Ultraschallspitze bei erkennbarer Beschädigung oder Abnutzung.

Prüfen Sie dies vor jeder Anwendung

4.5 Verbiegen oder polieren Sie die Spitze nicht.

4.6 Nachdem die goldfarbenen beschichteten Spitzen mit einer Oxidationslösung wie H₂O₂ oder NaClO in Kontakt gekommen sind, verwenden Sie bitte sauberes Wasser, um die Spitze abzuspülen.

5. Lagerung

Die Spitze sollte in einer sauberen, trockenen, belüfteten Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 93 %, einem atmosphärischen Druck von 70 kPa ~ 106 kPa, einer Temperatur von -20 °C ~ +40 °C in Innenräumen mit nicht korrosiven Gasen gelagert werden.